

車椅子に乗ったお客様が、介助無しでもバイキングを楽しめます!

# 車椅子用 バイキング トレイホルダー

バイキングトレイホルダーを車椅子に取り付ける事で  
トレイを持ちながら移動する必要がなくなります。  
車椅子のお客様にも  
気持ちよくバイキングを楽しんで頂けます。

車椅子の方への  
バリアフリー ニーズは  
年々高まっています。  
お客様の「また来たいね」の  
笑顔に繋がる  
思いやりの気持ちを形にできる…  
そんなご提案です。




対応トレイサイズ

たて 350mmまで  
×  
よこ 450mmまで

両手が空いて  
配膳・移動が  
スムーズに

床に置けば  
自立します

車椅子に  
座ったまま  
着脱可能

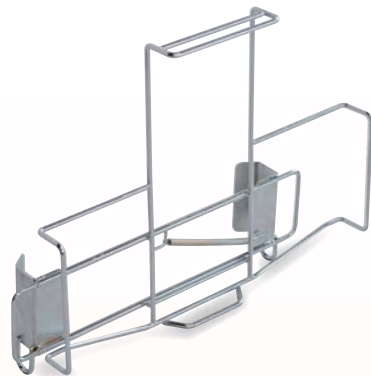

## 取付は簡単 3 ステップ



1. 片側のツメ部を車椅子の  
ひじ掛けに引っ掛けます。



2. 反対側のツメ部取手を  
引っ張ります。



3. 反対側のツメ部をひじ掛け  
に引っ掛けて取付完了です。

※ホルダーの上トレイを置いたままの食事はできません。  
※車椅子の種類によっては取り付けできない場合があります。

※左右逆でも着脱可能です。

## 取付可能な車椅子形状

座面幅

380mm  
450mm  
に取付可能



肘掛け形状

- 肘掛け先端～支柱まで  
100mm以上
- 肘掛け厚み(パイプ含む)  
22mm～44mm に取付可能



車椅子用バイキングトレイホルダー

品質表示

材質 / 本体:鉄(クロムめっき)・部材: 18-8 ステンレス  
サイズ / 約 366×497×115mm  
重量 / 約 1.3kg  
耐荷重 / 2kg

MADE IN JAPAN

販売 SHINDO

株式会社 シンドー <https://shindo1947.com/>

〒959-1288 新潟県燕市燕5525番地1 TEL: 0256-63-2566 FAX: 0256-64-2812

※品質改良の為、製品の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※印刷の都合上、製品の色が写真とは異なる場合があります。予めご了承ください。