

バスケットを支える必要がないから、車椅子を両手で操作できる

車椅子用 バスケットホルダー

車椅子用バスケットホルダーは車椅子を使用されるお客様の膝にバスケットを直接置くという不安定な状態を解消することで、安全にお買い物を楽しんでいただけます。



車椅子の方に買い物を楽しんで頂けるのはもちろん、介助者の方にも「また来たい」と感じて頂ける、そんな売り場を作ります。



耐荷重量
8kg

介助の方の負担を軽減できます

車椅子を両手で操作できます

対応バスケットサイズ

たて 350mmまで
×
よこ 450mm まで

※バスケット底部が 310mm×450mm 以下のものに限りです。

取付方法



1. 左右両側の固定用ボルトを緩め、片側の肘掛けにソメを引っ掛け、アームを引き延ばします。



2. 引き延ばしたアーム部を戻して固定位置を決定し、ソメを肘掛けに引っ掛けます。



3. 固定位置を決定したら固定用ボルトを締め込み、しっかりと固定してください。

※締め込みすぎに注意！

※ホルダーの上にバスケット以外はのせられません。

※車椅子の種類によっては取り付けできない場合があります。

※操作が左右逆でも脱着できます。

取付可能な車椅子形状

座面幅

380mm
～
450mm
に取付可能



肘掛け形状

- 肘掛け先端～支柱まで 100mm以上
- 肘掛け厚み(パイプ含む) 22mm～44mm に取付可能



販売定価

オープン価格

JAN コード

4530770 682459

製造販売元

 株式会社 シンダー

〒959-1288 新潟県燕市燕 5525-1

TEL : 0256-63-2566 Mail : sales@shindo1947.com

FAX : 0256-64-2812 Web : http://www.shindo1947.com/

品質表示

使用材料 / 鉄線・鋼板：鉄(クロムめっき)・鋼管：18-8 ステンレス鋼
外形寸法 / 約 381×528×172mm(未使用時)
製品重量 / 約 2.4kg
耐荷重量 / 8kg

※品質改良の為、製品の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※印刷の都合上、製品の色が写真とは異なる場合があります。予めご了承ください。

<日本製>

[20190826/0]